

## Pressprogramme Rohlinge

Hinweis: Die vorliegenden Brenn- und Presstemperaturen wurden im Zubler Vario 300 und dem Pressofen Zubler Vario Press 300e ermittelt und sind Richtwerte. Bei anderen Ofentypen sind eventuell Korrekturen der Brenntemperaturen erforderlich. Brenn- und Haltezeiten sind in der Brenntabelle und mögliche Material-Kombinationen sind in der Kombinationstabelle aufgeführt.

Pressofen	Start-Temperatur °C	Temp-Anstieg °C	Endtemperatur °C	Haltezeit	Presszeit	Vakuum-start	Pressdruck
Zubler Vario Press 300 100g Muffel	700	60	900	18	3	700	nieder
Zubler Vario Press 300 200g Muffel	700	60	915	20	3	700	nieder
Dekema press-i-dent 100g Muffel	700	60	910	15	3	700	Level 7
Dekema press-i-dent 200g Muffel	700	60	930	15	3	700	Level 7
Dentsply Multimat NT xpress 100g Muffel	700	60	930	15	3	700	
Dentsply Multimat NT xpress 200g Muffel	700	60	950	18	3	700	
Ivoclar Programat 100g Muffel	700	60	900	18	3	700	
Ivoclar Programat 200g Muffel	700	60	915	20	3	700	
Ugin 100g Muffel	700	60	900	15	3	700	
Ugin 200g Muffel	700	60	930	18	3	700	

**Bitte setzen Sie in Pressöfen der Firma Ivoclar den Wert „E“ auf „E600“!**

